

PennyTalks

Ihr sprechendes Markierungssystem

Organisieren Sie Ihren Alltag!

Frikadellen
eingefroren
13.04.2015

Etikett

Blaues Hemd,
passend zur
grauen Hose

Etikett

Etikett

24. März:
Arzttermin um
10:30 Uhr

Etikett

Vitamin C,
Dosierung:
3 x am Tag

- Sprachgeführte Bedienung
- 12 verschiedene Sprachen
- Datensicherung auf wechselbarer Speicherkarte
- Hohe Klangqualität
- Taktile Tasten
- Waschmaschinen und Trockner geeignete Etiketten



Ein produkt von:

TalkTech
of Sweden

PennyTalks

Ihr sprechendes Markierungssystem



Sprachunterstützte Benutzerführung:

Die Sprachausgabe führt Sie durch die Bedienung:




"Neues Etikett"
"Starte Aufnahme"
"Aufnahme beendet"
"Gelöscht"
...etc.

USB-Verbindung mit
die Speicherkarte.

Datensicherung in Echtzeit:

Alle mit Ihrer Stimme aufgenommenen Beschreibungen
befinden sich auf einer auswechselbaren Speicherkarte.

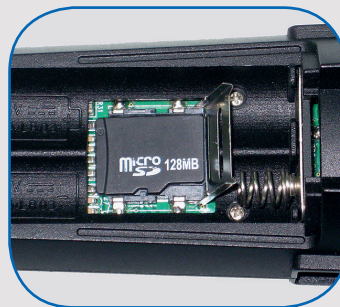

Sprachen:

PennyTalks bietet Ihnen 12 Sprachen sowie einen
Signalton Modus.

Svenska • Deutsch
• English • Español
• Norsk • Dansk
• Suomi • العربية
• Français • Nederlands
• Italiano • Русский

Benötigtes Zubehör bereits enthalten:

- Kopfhörer
- Umhängeband
- USB-Kabel
- Batterien
- (Nicht aufladbar)
- Selbstklebende, taktile Etiketten
- Selbstklebende, taktile Etiketten
für Kleidung, Geeignet für
Waschmaschine und Trockner
- Sprachwahlkarte



Schnellstart:

Plazieren Sie ein selbstklebendes
Etikett auf einen Gegenstand, den
Sie markieren möchten.

Halten Sie die Sensorspitze auf
das Etikett und nehmen Sie eine
Beschreibung auf.

Spielen Sie Ihre Aufnahme ab,
indem Sie die Sensorspitze erneut
auf das Etikett halten.

Technische Daten:

Batterien: Type AAA 1.5 V

USB-Verbindung

Mitgelieferte Speicherkarte: bis zu 2700 Aufnahmen

Mit optionaler Speicherkarte: bis zu 90000 Aufnahmen

Contact:

VITECH AB
Box 74
SE-131 07 NACKA
SWEDEN
Phone: +46 8 7830010
Email: info@talktech.se

Ein Produkt von:



www.talktech.se